


BacilloI[®] AF

Desinfectante de base alcoólica de
acção rápida

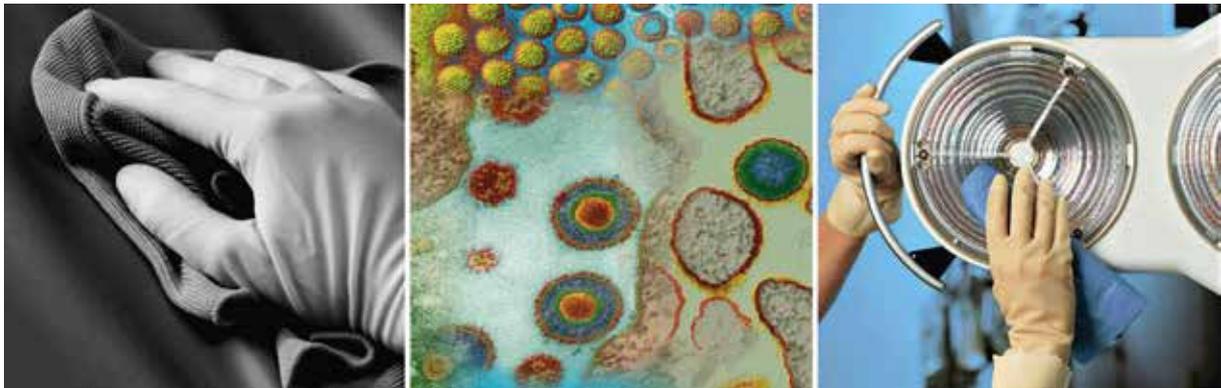

Desinfectante de base alcoólica de acção rápida, isento de aldeídos, fragrâncias e colorantes. Não deixa resíduos.



Bacillo[®] AF

Propriedades do produto

- Sem fragrâncias
- Sem aldeídos
- Não deixa resíduos

Composição

Ingredientes activos em 100 g: Propan-1-ol 45.0 g, propan-2-ol 25.0 g, etanol 4.7 g.

Actividades microbiológicas

Bactericida, Leveduricida, fungicida, tuberculicida, micobactericida, virucida contra vírus encapsulados (incl. HBV, HIV, HCV), adenovírus, parvovírus e rotavírus.

Áreas de aplicação

Bacillo[®] AF está indicado para a desinfecção rápida de superfícies resistentes ao álcool, onde é exigida uma desinfecção rápida e uma secagem sem resíduos, por ex.:

- equipamento médico incluído na Directiva de Dispositivos Médicos
- hospitais e residências
- cozinhas industriais e áreas de processamento de alimentos

Instruções de aplicação

Limpar as superfícies a desinfectar com a solução pronta a usar suficiente para assegurar uma cobertura completa.

A quantidade de solução aplicada não deve exceder 50 ml por m². A quantidade total aplicada por sala não deve exceder 100 ml por m² de área. Instruções especiais de acordo com as regras de segurança para a prevenção de fogo e explosão causados por desinfetantes de álcool emitidas por associação profissional.

Só devem ser tratadas as superfícies a ser desinfectadas. A desinfecção só pode ser efectuada quando não existirem vapores ou gases combustíveis na sala (por ex. petróleo, éter). Se a corrente eléctrica não puder ser desligada no quadro principal, devem ser tomadas medidas para evitar que qualquer interruptor seja ligado. As superfícies quentes devem ter arrefecido o suficiente.

Durante a aplicação do spray o sistema de ventilação (ar condicionado) deve estar a funcionar, ou deve assegurar-se que haja ventilação. Notas especiais: Não está indicado para acrílico, Plexiglas[®] ou lacados de base alcoólica. Em caso de dúvida, teste a resistência de materiais delicados antes de utilizar.

Use os desinfetantes com segurança. Leia sempre o rótulo e a informação sobre o produto antes de o utilizar.

Dosagem

Desinfecção de superfícies (com toalhete)

Bactericida/Leveduricida¹⁾			
- Condições de sujidade	conc	-	30 seg ²⁾
	conc	-	5 min
Fungicida¹⁾			
- Condições de sujidade	conc	-	5 min
Tuberculicida¹⁾			
- Condições de sujidade	conc	-	30 seg ²⁾
	conc	-	5 min
Micobactericida¹⁾			
- Condições de sujidade	conc	-	30 seg ²⁾
	conc	-	5 min
Virucida contra vírus encapsulados (incl. HBV, HIV, HCV)			
	conc	-	30 seg
Adeno vírus			
	conc	-	1 min
FCV³⁾			
	conc	-	5 min
Papova vírus			
	conc	-	10 min
Rota vírus			
	conc	-	1 min
Processamento de alimentos (Bactericida+ Fungicida)⁴⁾; Área A			
- área pouco suja - 20 °C	conc	-	30 min
- área pouco suja - 10 °C	conc	-	30 min
Processamento de alimentos (Bactericida +Fungicida)⁴⁾; Área A			
- área muito suja - 20 °C	conc	-	30 min
- área muito suja - 10 °C	conc	-	30 min
Processamento de alimentos (Bactericida+ Fungicida)⁴⁾; Área B			
- área pouco suja - 20 °C	conc	-	30 min
- área pouco suja - 10 °C	conc	-	30 min
Processamento de alimentos (Bactericida+ Fungicida)⁴⁾; Área B			
- área muito suja - 20 °C	conc	-	30 min
- área muito suja - 10 °C	conc	-	30 min

1) Utilizando novos métodos standard; com acção mecânica

2) Desinfecção rápida

3) vírus sucedâneo de norovírus, sem carga orgânica

4) DVG

Listagem

Certificado/Lista emitida pela Associação para Higiene Aplicada (VAH).

Listagem emitida pela Sociedade Alemã de Medicina Veterinária (DVG) Higiene Alimentar.

Marcação CE conforme Directiva sobre Dispositivos Médicos (MDD).

Dados físico - químicos

Ponto de inflamação (DIN 51755)	25 °C
Densidade (20 °C)	aprox. 0.86 g/cm ³
Refracção n _D ²⁰	aprox. 1.38



Bacilloi[®] AF

Apresentações

Garrafas de 50 ml, 500 ml, 1 litro, 5 litros.

Rotulagem conforme EG 1999/45: Irritante. Inflamável. Constitui perigo para os olhos. Os seus vapores podem causar sonolência e tonturas. Manter afastado do alcance das crianças. Não inspirar os seus vapores. Em caso de contacto com os olhos, lavar imediata e abundantemente com água e consultar ao médico. Utilizar apenas em áreas bem ventiladas.

As recomendações sobre os nossos produtos baseiam-se em testes científicos e são fornecidas de boa fé. Recomendações mais detalhadas, tais como a compatibilidade com os materiais, são apenas possíveis em casos especiais. As nossas recomendações não são obrigatórias nem constituem uma garantia. Não obstem a que o cliente realize os seus próprios testes, tendo em vista os seus objectivos e processos. A esse propósito não podemos aceitar qualquer responsabilidade. A nossa responsabilidade está de acordo com as nossas condições gerais de venda e fornecimento

05-07

